






# **BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO – 450H**

# **DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

A **450H** é uma fita adesiva dupla face hospitalar com dorso de papel na cor branca e coberto em ambos os lados com adesivo base borrachas e resinas. O produto vem protegido por um liner de papel super calandrado siliconizado branco de fácil remoção.

# **CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:**

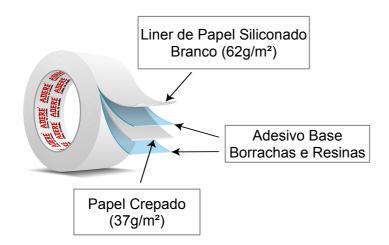

#### **PROPRIEDADES FISICAS:**

Cor da fita: Branca

Espessura da fita: 135 micra

Liner de proteção: Papel Siliconado Branco

### **APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:**

**APRESENTAÇÃO:** Consultar equipe comercial.

**ESTOCAGEM:** Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

**CONDIÇÃO DE USO:** Aplicar o produto sobre a superficie limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

Rev 03 Abril/22 Página 1/2









#### **BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 450H**

# **DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):**

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 180°	Aço lado externo: Aço lado interno:	403,0 gf/cm 457,0 gf/cm	ASTM-D3330
Tack Rolling Ball	Esfera de aço diâmetro 11,1 mm	0,5 cm	PSTC 6
Tração e Alongamento	Tração Alongamento	1,7 kgf/cm 11,7 %	PSTC 131
Temperatura	Mínima de aplicação: De trabalho:	15°C -25 a 60°C	-
Avaliação do Potencial de Irritabilidade Primária, Acumulada e Sensibilização Cutânea de um Produto em Condições Controladas e Maximizadas *	Irritabilidade cutânea primária e acumulada Sensibilização cutânea	Não induziu ao processo Não induziu ao processo	-

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação. \* Relatório All-S-RIPT-097800-01-11-21-RFV01-Rev01

# **APLICAÇÕES TIPÍCAS:**

Bolsas de colostomia e coletores de urina no segmento médico hospitalar.

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: http://adere.com.br/reciclagem.pdf



Rev 03 Abril/22 Página 2 / 2